

Gebrauchsanleitung

Dusch-Toilettenrollstuhl mit 24"-Antriebsrädern

Art.-Nr. 17502 550



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Der Dusch-Toilettenrollstuhl mit 24"-Antriebsrädern erhöht die Selbstständigkeit bei der Toilettenbenutzung und beim Duschen und verbessert die damit verbundenen körperhygienischen Maßnahmen, insbesondere indem er beeinträchtigte oder fehlende Funktionen des Bewegungs- oder Halteapparates kompensiert.

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob sich der Dusch-Toilettenrollstuhl in einwandfreiem Zustand befindet und vergewissern Sie sich über den festen Sitz aller Verbindungen!
- Bei Unsicherheiten oder offenen Fragen zur Montage oder Pflege fragen Sie bitte Ihren Fachhändler!
- Das angegebene Höchstgewicht für Benutzer von 130 kg darf nicht überschritten werden!
- Achten Sie bitte darauf, dass der Dusch-Toilettenrollstuhl Ihren Bedürfnissen entspricht. Fragen Sie im Zweifel Ihren Arzt oder Fachhändler!
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch den Fachhändler ersetzt werden!
- Der Dusch-Toilettenrollstuhl darf nicht im Freien verwendet, abgestellt oder aufbewahrt werden!
- Verwenden Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl nur auf horizontalem, ebenen und festen Untergrund!
- Vermeiden Sie weites Hinauslehnen und starke ruckartige Bewegungen!
- Bei Verwendung in Verbindung mit einem Toilettenbecken sind die Bremsen festzustellen!
- Das Setzen auf die Armlehnen ist untersagt!
- Steigen Sie niemals beim Hinsetzen oder Aufstehen auf die Fußrasten!
- Die Füße sind bei Bewegungen des Dusch-Toilettenrollstuhls auf den Fußstützen abzustellen.
- Bei Bewegungen des Dusch-Toilettenrollstuhls die Armlehnen wieder herunterklappen, wenn sie für den Patiententransfer nach oben geklappt wurden.
- Achten Sie bei der Benutzung des Dusch-Toilettenrollstuhls darauf, sich nicht Finger oder andere Körperteile einzuquetschen!
- Sorgen Sie dafür, dass diese Anleitung von allen Personen, die den Dusch-Toilettenrollstuhl verwenden, auch sorgfältig gelesen wird. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.
- Halten Sie den Dusch-Toilettenstuhl von offenen Flammen fern!
- Bei starker Sonneneinstrahlung können sich Teile des Dusch-Toilettenrollstuhls, z. B. Sitzfläche oder Rückenlehne, stark erhitzen. Achten Sie daher darauf, den Dusch-Toilettenrollstuhl an einer lichtgeschützten Stelle zu positionieren.

Indikation

Der Dusch-Toilettenrollstuhl mit 24"-Antriebsrädern ist für die Nutzung im Innenbereich, sowohl im häuslichen Umfeld sowie in Einrichtungen, vorgesehen. Das Produkt kann in Duschkabinen, an Waschbecken oder über Toiletten sowie zum Transport zum und vom Badezimmer verwendet werden.

Die Benutzung des Dusch-Toilettenrollstuhls fördert die Durchführung von Hygienemaßnahmen bei Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit. Das Produkt ist zum Ausgleich verschiedener Arten von Verletzungen oder Behinderungen, die die Mobilität des Benutzers einschränken, vorgesehen. Das Produkt ist für erwachsene Benutzer bestimmt, in der Regel Personen mit einer Körpergröße von mindestens 146 cm und einem Gewicht von mindestens 40 kg. Das Produkt ist nicht für andere als die oben genannten Anwendungen oder Umfelder bestimmt.

Kontraindikation

Personen, die ihr Gleichgewicht im Sitzen nicht eigenständig kontrollieren können, sollten den Dusch-Toilettenrollstuhl nicht benutzen. Bei eingeschränkter Funktion der Hand- und Armfunktion ist die Nutzung des Dusch-Toilettenrollstuhls mit 24"-Antriebsrädern nicht angezeigt.

Lieferumfang

Der Dusch-Toilettenrollstuhl wird vormontiert im Karton verpackt geliefert. Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit:

- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Fahrgestell inkl. Armlehnen und Rückenlehne
- 1 Abdeckung für den Eimer-Ausschnitt am Sitz
- 2 Rollen
- 2 Schrauben und Muttern zur Montage der Räder
- 2 abnehmbare Fußrasten
- 1 Toiletteneimer mit Deckel und Bügel
- 2 24"-Antriebsräder
- 2 Montageplatten der 24"-Antriebsräder
- 4 Befestigungsschrauben sowie 4 Muttern für die Montageplatten
- 2 Steckachsen für die 24"-Antriebsräder
- 2 Bremssets inkl. 4 Fixierschrauben

Montage

Rollen montieren

Die 5"-Räder werden mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern am vorderen Rahmen montiert.

Montage der 24"-Hinterräder

- Montieren Sie die beiden Montageplatten an den beiden hinteren Rahmenrohren. (Abb. 1)
- Am hinteren Rahmenrohr befinden sich verschiedene Löcher, die es ermöglichen, die Sitzhöhe des Dusch-Toilettenrollstuhls einzustellen. Wählen Sie an beiden Rahmenrohren die 2 benötigten Löcher auf derselben Höhe und achten Sie darauf, dass die Löcher der Montageplatten mit denen der Rahmenrohre übereinstimmen.
- Befestigen Sie jede Montageplatte mit je 2 Befestigungsschrauben und ziehen Sie die beiden Muttern fest an. Kontrollieren Sie nochmals, dass die beiden Achsenlöcher (Buchsen) auf derselben Höhe liegen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Mutter an der Steckachse gut festgezogen ist.
- Schieben Sie die Steckachse durch das 24"-Antriebsrad. Drücken Sie den schwarzen Knopf in der Mitte des 24"-Rades und stecken das Rad mit der Steckachse in das Achsenloch. Lassen Sie den Knopf wieder los. (Abb. 2)
- Kontrollieren Sie ob das Rad richtig montiert ist, indem Sie versuchen es abzunehmen, ohne den Knopf an der Steckachse zu drücken.
- Nach der Montage der 24"-Antriebsräder kann es notwendig sein, die Höhe der Vorderräder nachzustellen. Die Höhe ist richtig eingestellt wenn die Sitzfläche parallel zum Boden ist.



Montage der Bremsen

Die Bremsen werden am Rahmen des Dusch-Toilettenrollstuhls montiert und dienen zum Feststellen der beiden Hinterräder. (Abb. 3, Abb. 3.1, Abb. 3.2)

- Das Brems-Set besteht aus zwei Montageklammen mit je 2 Befestigungsschrauben und einem linken und rechten Bremsmechanismus.
- Fügen Sie den Bremsmechanismus in den kleineren Ausschnitt der Montageklammer ein und montieren Sie das Brems-Set am Rahmenrohr wie am oberen Bild gezeigt.
- Stellen Sie den Bremsmechanismus so ein, dass die Bremsbacke den Reifen bei aktivierter Feststellbremse mindestens 5 mm tief eindrückt.
- Ziehen Sie nun die Inbusschrauben an der Montageklammer fest. Drücken Sie gegen den Dusch-Toilettenrollstuhl, um sicherzustellen, dass die Bremse fest genug gezogen wurde, um den Dusch-Toilettenrollstuhl zu immobilisieren.



- Wiederholen Sie den Vorgang für die gegenüberliegende Feststellbremse.

Rücken- und Armlehnen montieren

1. Nehmen Sie die Rückenlehne aus dem Karton. Stecken Sie die Rohrenden der Rückenlehne in die Rohrenden des Fahrgestells bis zum Anschlag ein. Achten Sie darauf, dass die Innenseite der Rückenlehne zur Stuhlmitte zeigt.
2. Drehen Sie die beiden Sternschrauben auf der Stuhl-Rückseite im Uhrzeigersinn fest an.
3. Die Armlehnen rasten selbsttätig ein, wenn Sie sie mit einem kleinen Ruck von unten nach oben schwenken.

Fußrasten montieren

Stecken Sie das Fußrasten-Rohrgestänge in die dafür vorgesehenen Halterungsstifte am Hauptrahmen. Schwenken Sie das Fußrasten-Rohrgestänge zur Mitte. Die Verschlussmechanik schnappt automatisch ein. Nun können Sie die Fußplatten herunterklappen.

So sichern Sie Ihren Dusch-Toilettenrollstuhl gegen ungewolltes Wegrollen:

Anwendung

Hochklappen der Armlehnen

- Diese Funktion kann hilfreich sein, um dem Benutzer ein leichteres Hinsetzen und Aufstehen zu ermöglichen.
- Das Hochklappen der Armlehnen ermöglicht eine einfachere Körperhygiene. Lassen Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl mit hochgeklappten Armlehnen nie unbeaufsichtigt, wenn jemand ihn benutzt.
- Um die Armlehnen hochzuklappen, kippen Sie die Armlehne nach hinten, indem Sie sie vorne anheben.
- Um die Armlehne wieder in die Ausgangsstellung zu bringen, kippen Sie sie einfach wieder nach vorne, bis sie waagrecht festsitzen.
- Die Armlehnen müssen nach dem Transfer des Patienten, und wenn der Dusch-Toilettenrollstuhl bewegt werden soll, immer wieder heruntergeklappt werden.

Abnehmen und Anbringen der Fußstützen

- Hochgeklappte Fußstützen können dem Benutzer ein leichteres Hinsetzen in den und Aufstehen aus dem Dusch-Toilettenrollstuhl ermöglichen.
- Bewegen Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl mit abgenommenen Fußstützen nicht, wenn jemand darauf sitzt. Beim Bewegen des Stuhls stellen Sie die Füße des Benutzers immer auf die Fußstützen.
- Um die Fußstützen zu lösen und abzunehmen, ziehen Sie den Blockierhebel nach oben und drehen Sie die Fußstützen nach außen. (Abb. 4)
- Fassen Sie die gelöste Fußstütze am oberen Rohr und ziehen Sie sie nach oben aus dem vorderen Rahmenrohr. (Abb. 5)
- Um die Fußstützen wieder anzubringen und zu fixieren, stecken Sie sie wieder in das Rahmenrohr und drehen sie nach innen, bis der Blockierhebel wieder einrastet.



Abb. 4



Abb. 5

Einstellung der Fußstützen auf die gewünschte Höhe

- Die Höhe der Fußstützen des Dusch-Toilettenrollstuhls sollte an den Benutzer angepasst werden. Die Fußstützen sind 5-fach verstellbar.
- Die Höhe ist korrekt eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Dusch-Toilettenrollstuhl sitzt, seine Oberschenkel auf dem Sitz korrekt aufliegen und beide Füße auf den Fußstützen ruhen.
- Um die Höhe der Fußstützen einzustellen, nehmen Sie diese vom Dusch-Toilettenrollstuhl ab und entfernen Sie die Fixierschraube mit einem Sechskantschlüssel.
- Stellen Sie die Höhe der Fußstützen ein, indem Sie das innere im äußeren Rohr nach oben oder unten verschieben.
- Ziehen Sie die Fixierschraube wieder fest.

Einstellung der gewünschten Sitzhöhe



- Die Sitzhöhe sollte an den Benutzer angepasst werden. Der Stuhl ist richtig eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Stuhl sitzt und beide Füße fest und eben auf dem Boden stehen!
- Die Sitzhöhe nur einstellen, wenn niemand auf dem Stuhl sitzt!
- Zur Einstellung der Sitzhöhe entfernen Sie die Sternschraube (Abb. 6). Nun lässt sich das Teleskop-Rohr mit dem 5"-Rad im Rahmen bewegen und kann in der Höhe eingestellt werden. (3 Positionen, s. Abb. 7.1–7.3)



- Wenn Sie die gewünschte Höheneinstellung ermittelt haben, führen Sie die Schraube ein (je nach Höhe) und befestigen sie mit der dazugehörigen Mutter. (Abb. 6)
- Stellen Sie alle 4 Teleskop-Rohre immer auf dieselbe Höhe ein!
- Die Höhe der Achsen der 24"-Räder müssen so eingestellt werden, dass die Sitzfläche eben und waagrecht ausgerichtet ist.

Benutzung des Toiletteneimers

- Um den Toiletteneimer zu benutzen, entfernen Sie die Sitzabdeckung. (Abb. 8)
- Entfernen Sie den Deckel des Toiletteneimers und schieben Sie den Eimer von hinten in die Führungsschiene unterhalb des Sitzes.
- Nach Benutzung setzen Sie den Deckel wieder auf den Toiletteneimer und entfernen Sie diesen vom Dusch-Toilettenrollstuhl. (Abb. 9)
- Entleeren und reinigen/desinfizieren Sie den Toiletteneimer und setzen Sie diesen wieder in den Dusch-Toilettenrollstuhl ein. (Abb. 10)
- Belassen Sie den Toiletteneimer nie in vollem oder ungesäubertem Zustand.
- Decken Sie den Toiletteneimer wieder mit der Sitzabdeckung ab!

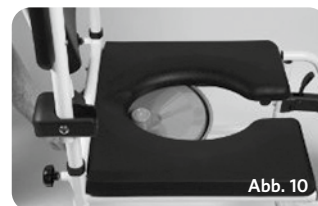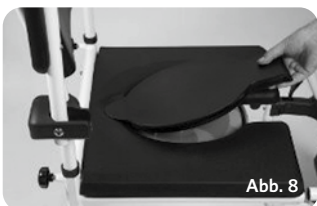

Reinigung

Für die manuelle Reinigung sind warmes Wasser und ein neutraler Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem handelsüblichen, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!

Patientenwechsel

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Es ist entsprechend den Anweisungen zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist es durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für den Wiedereinsatz freizugeben. Fordern Sie unsere Hygiene- und Wartungshinweise an.

Wartungstabelle	
Wann	
Vor jedem Wiedereinsatz	
Was	Zur Beachtung
Überprüfung des allgemeinen Zustands Sichtprüfung aller Rahmenteile einschließlich der Schweißnähte auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion (insbesondere Armlehnen, Rückenlehne, Sitzpolster, Trittplächen, Fußrasten-Konstruktion, Toiletteneimer mit Deckel) sowie Prüfung der Rollen auf Fahrbarkeit.	Bei Feststellung von Mängeln tauschen Sie die betreffenden Produktteile aus. Ein Austausch des Toiletteneimers mit Deckel ist bei jedem Patientenwechsel vorzunehmen.
Überprüfung von Reifenprofil und Kugellager	Bei Feststellung von Verschleiß oder Rissen muss ein Austausch der Räder vorgenommen werden.
Prüfung aller Verbindungselemente (z. B. Muttern, Schrauben etc.) auf Funktion, Vollständigkeit und festen Sitz.	Bei Feststellung von gelösten oder fehlenden Schrauben, Muttern, Nieten etc. müssen diese festgezogen, ergänzt bzw. ersetzt werden.

Hygieneplan

Vor jedem Wiedereinsatz bzw. vor jedem Patientenwechsel ist der Dusch-Toilettenrollstuhl zu reinigen und zu desinfizieren.

Reinigung/Desinfektion

1. Vor der Aufbereitung des Dusch-Toilettenrollstuhls Schutzhandschuhe und ggf. Schutzbekleidung (Einmalschürze, Mund-Nasen-Schutz etc.) anziehen.
2. Immer zuerst die Reinigung, anschließend die Desinfektion durchführen.
3. Der Dusch-Toilettenrollstuhl kann zur Entfernung von Verunreinigungen mit lauwarmem Wasser, neutralen, handels- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch gesäubert und danach abgespült und getrocknet werden. Keine scheuernden, ätzenden oder bleichenden Reinigungsmittel einsetzen. Nutzen Sie für die Reinigung keine Metallbürsten oder sonstige scharfkantige Reinigungshilfen. Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln ist der Dusch-Toilettenrollstuhl gründlich mit klarem Wasser abzuspülen. Vor der Desinfektion dürfen sich keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf der Oberfläche befinden. Den Dusch-Toilettenrollstuhl nach der Reinigung mit einem trockenen, sauberen Tuch nachtrocknen.
4. Den Dusch-Toilettenrollstuhl mit einem DGHM-/VAH-gelisteten Desinfektionsmittel abwischen bzw. einsprühen (Einwirkzeit nach Vorgabe des Herstellers beachten). Das Produkt kann mit einem Desinfektionsmittel mit 70-80-prozentigem Ethanolgehalt desinfiziert werden. Chlor- oder phenolhaltige Desinfektionsmittel dürfen nicht verwendet werden. Die Wischdesinfektion ist grundsätzlich der Sprühdesinfektion vorzuziehen. Nach der Einwirkzeit des Desinfektionsmittels den Dusch-Toilettenrollstuhl mit einem trockenen, sauberen Tuch nachtrocknen.

Material

- Rahmen: Aluminiumrohr pulverbeschichtet
- Sitzfläche/Sitzpolster/Rückenlehne/Armlehne: Polyurethan-Schaum
- Fußstütze: Polyamid
- Fersenband: Nylon
- 5"-Rad: Polyamid
- 24"-Antriebsrad: Polyamid, Polyurethan
- alle Schrauben: Edelstahl

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer des Dusch-Toilettenrollstuhls beträgt drei Jahre, bei täglicher Anwendung und Reinigung, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in der Gebrauchsanleitung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es keine Beschädigungen aufweist und sich in einem sicheren Zustand befindet.

Lagerung

Lagern Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl abgedeckt an einem staub- und lichtgeschützten Ort. ☂️ ⚡
Nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern.

Entsorgung

Entsorgen Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie vorher Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

Technische Daten

Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42,5 cm
Sitzhöhe	49,5-54 cm einstellbar
Sitzausschnitt	21 x 34 cm
Höhe Rückenlehne	46 cm
Max. überfahrbare Höhe (WC)	42-46,5 cm einstellbar
Gesamtbreite inkl. Armlehnen	67 cm
Gesamttiefe	109 cm
Gesamthöhe	97-101 cm einstellbar
Max. Belastbarkeit	130 kg
Gesamtgewicht	17,2 kg

 Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung. 

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.
Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.
Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.
Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.